

胸部手術後の“呼吸と痛み”に対する療法



術後直ぐに装着して下さい！
優しく、しっかり胸部をサポートします（一体型ハンドル採用）。

クオリブレスは、術後患者さんを肉体的、精神的にサポートを致します。

1
咳

2
くしゃみ

呼吸療法

呼吸の快適さと痛みを
和らげることをお約束
いたします。

ベッドへの
昇り降り・・・

等に伴う“痛みや
不快感”を和らげます。

- ① 胸全体を幅広く覆う伸縮性に優れたサポーターです。
- ② 必要に応じ2本のハンドルを握る事により胸の痛みを和らげます。
- ③ サポーター留め部が左前にあるため装着や調節が簡単で、肩ストラップによりズレ落ちる心配がありません。




病院職員の方の手を煩わせることなく
術後何時でも患者自身で装着できる補助装具です。

正しい装着位置

- 上端が出来るだけ「脇の下にくるように」する。
- 肩ひもを引っ張って背中の高い位置まで持ち上げる。
- 出来るだけ胸の高い位置まで引き上げる。
- 2本のハンドルが胸骨の中心にくるようにします。
- 女性は胸の上位にくるようにします。
- 豊胸な女性はクオリブレスの下にスポーツブラジャーを着け引き上げることで胸の重みから傷を守って下さい。



胸囲サイズを計測するために
この箇所を計測して下さい。

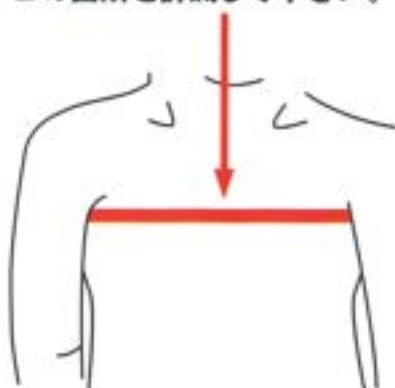

注文番号	クオリブレス サイズ	患者胸囲
QB 4-6	小児 4~6歳	56~62cm
QB 6-8	小児 6~8歳	62~68cm
QB 8-10	小児 8~10歳	68~75cm
QB XS	小児/大人 Extra Small	75~84cm
QB S	大人 Small	84~92cm
QB M	大人 Medium	92~100cm
QB L	大人 Large	100~108cm
QB XL	大人 Extra Large	108~113cm
QB XXL	大人 Extra Extra Large	113~122cm

販売名 クオリブレス

製造販売届出番号 13B1X10261QTS001

製造販売業者 JPクリード株式会社

〒111-0035 東京都台東区西浅草1-7-19

Tel 03-6912-1090 Fax 03-6912-1091

<http://www.jpcreed.jp>

製造元 QUALITEAM s.r.l. Italy

楽天HP・弊社HPはこちら

